



SILLA DE RUEDAS CON CÓMODO Y CÓMODO SANITARIO

KB225
KB215

KP
KONFORT PLUS

Konfort Plus

Agradecemos su preferencia de los Productos Konfort Plus. Deseamos conocer sus comentarios, preguntas y opinión sobre la calidad de servicio que ha recibido de su distribuidor autorizado.

Para Contestar sus Inquietudes

Su distribuidor autorizado puede brindarle una asesoría y responder todas sus inquietudes acerca de la seguridad, uso y mantenimiento. Para referencia futura, complete la siguiente información:

Distribuidor:

Dirección:

Teléfono:

No. Serie:

Fecha de Compra:

Este manual provee instrucciones importantes respecto a la seguridad y mantenimiento del producto. Asegúrese de leerlo cuidadosamente antes de usarlo, y consúltelo cuantas veces sea necesario para garantizar el uso apropiado y seguro.


Para servicio y reparaciones, recuerde que su distribuidor autorizado de KB le puede ofrecer la ayuda que necesite.

Conserve este manual en un lugar seguro para una consulta futura.

Instrucciones De Instalación para los Modelos: KB225 y KB215

Antes de iniciar la instalación verifique que todas las partes estén completas:


Estructura

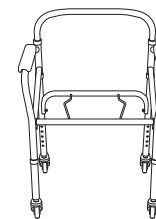


Balde



Aro

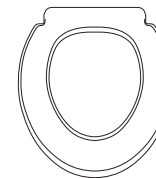


Tapa

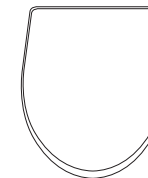


Armar la Estructura

Despliegue los laterales de la estructura hacia los costados ubicándolos paralelamente entre ellos y de manera perpendicular al respaldo, posteriormente eleve la parrilla y haga una presión suave en las esquinas para ajustar la estructura.

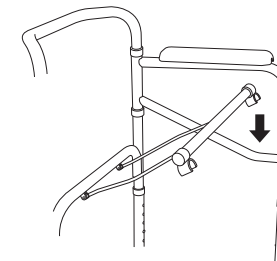


Instalar Balde

Inserte el balde en la parte superior de la parrilla del cómodo sanitario.

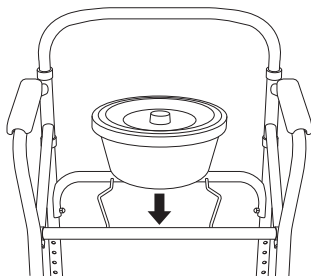


Instalar el Aro

Instale el aro en la parte trasera de la estructura de la parrilla y haga una presión suave para ajustar al cómodo sanitario.

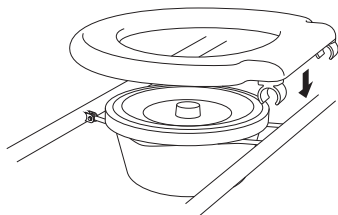

Instalar el Tapa

Instale la tapa por encima del aro y haga una presión suave para ajustar a la parte trasera de la estructura de la parrilla del cómodo sanitario.

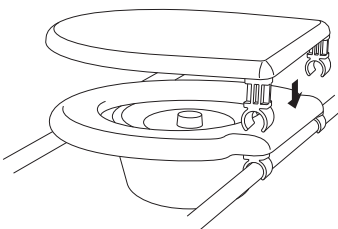


Graduación en Altura

Los cómodos sanitarios cuentan con 5 opciones de graduación en altura hasta el asiento.

Para ajustar la altura, presione el pin de seguridad de la base del cómodo y llévelo hasta la opción de altura deseada. Repita este procedimiento en las otras tres bases del cómodo.

Asegúrese de colocar la misma altura en las 4 bases del cómodo. Presione las bases hacia abajo para asegurarse que quedaron bloqueadas en su lugar.

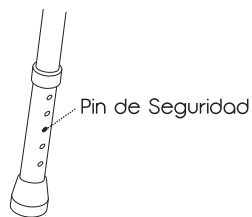

Limpieza

Para conservar en buen estado el cómodo sanitario Konfort Plus, es necesario que después de cada uso limpie el recipiente, aro y tapa. Realice limpiezas periódicas al recipiente, tapa, aro y apoyabrazos dependiendo del uso de este producto con jabón suave y enjuague con agua tibia. No utilice abrasivos.

Mantenga lubricados los pines de seguridad para que estos funcionen correctamente.

Precauciones Adicionales

- Inspeccione todas las partes antes de ensamblarlas para asegurarse que no se hayan dañado durante el envío. NO LO USE si detecta daños por envío. Póngase en contacto con el distribuidor para recibir instrucciones adicionales.
- Asegúrese que los pines de seguridad de ajuste en altura salgan completamente por los orificios respectivos para cada extensión de la base. Esto asegurará que las extensiones de las bases estén bloqueadas de manera segura en su posición y que tengan una altura uniforme.

- Asegúrese que TODOS los tornillos estén ajustados.
- Verifique que los tapones de plástico o ruedas de las extensiones de las bases no estén rotos, desgastados o ausentes. Reemplace inmediatamente cualquier tapón, o rueda o reemplácelos todos si tienen imperfecciones.
- Todos los cuatro tapones o ruedas de las bases DEBEN tocar el piso simultáneamente en todo momento.
- NO se pare sobre el cómodo.

Especificaciones Técnicas

Referencia	KB225CR-AL19	KB225CR-API	KB215SR-AL	KB215SR-API9
Profundidad	44 cm	44 cm	44 cm	44 cm
Peso Neto	6 kg	75 kg	55 kg	7 kg
Capacidad de Peso	90 kg	90 kg	90 kg	90 kg
Ancho del Asiento	44 cm	44 cm	44 cm	44 cm
Material	Aluminio	Acero Pintado	Aluminio	Acero Pintado
Tipo de Estructura	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable
Tipo de Apoyo	Ruedas 3"	Ruedas 3"	Tapón antideslizante	Tapón antideslizante
Altura del asiento al piso	47 cm - 57,5 cm	47 cm - 57,5 cm	43 cm - 53 cm	43 cm - 53 cm
Calibre del tubo	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm

Garantía

Los cómodos sanitarios Konfort Plus cuentan con un (1) año de garantía en la estructura central por defectos de fabricación.

Esta garantía no cubre fallas del aparato debidas a mal uso o negligencia por parte del propietario, exceso de la capacidad de peso o por el uso y desgaste normales. Esta garantía no se extiende a los componentes no durables, tales como los accesorios de tapa, aro, balde, ruedas y apoyabrazos que están sujetos a desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

