


4. CUIDADO Y MANTENIMIENTO

 No use un detergente abrasivo, limpiador o un trapo para limpiar o secar el asiento de inodoro elevado.

1. La limpieza del eleva sanitario es recomendada de manera regular. Limpie todas las superficies con un paño húmedo y seque toda la superficie antes del uso.
2. Inspeccione las partes del eleva sanitario, y verifique que ninguna de sus partes estén: deformadas, corroídas, rotas, desgastadas o comprimidas. Reemplace el eleva sanitario si una de estas condiciones existe.

5. GARANTÍA

Estos productos de la marca Konfort Plus cuentan con un año de garantía en la estructura central. En el caso de un defecto cubierto por esta garantía, repararemos o reemplazaremos el aparato, de acuerdo a nuestra opinión. Esta garantía no cubre fallas del aparato debidas a mal uso o negligencia por parte del propietario o por el uso y desgaste normales. Esta garantía no se extiende a los componentes no durables, tales como los accesorios de goma, ruedas y mangos que están sujetos a desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Fabricado por: CAREMAX REHABILITATION EQUIPMENT CO.,LTD

Dirección del Fabricante: Pingnan Industrial Zone, Guicheng Street, Nanhai District, Foshan, Guangdong, China


Importado por: IMPORMEDICAL EQUIPOS Y SUMINISTROS MÉDICOS S.A.

Dirección del Importador: Calle 32A # 26 -58, Palmira, Colombia.

Teléfono: (2) 285 5088




MANUAL DE USUARIO ELEVA SANITARIOS

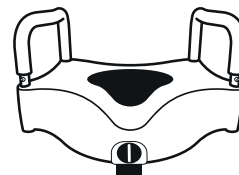

KP3-67034



KP3-67032

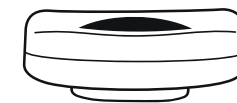

KP3-67033

1. GENERAL

1.1 Símbolos

Las señales son usadas en este manual y aplicadas en prácticas riesgosas las cuales podrían resultar en lesiones personales o daños en la propiedad. Vea la información consignada abajo para las definiciones de las señales



Peligro

Indica una situación de riesgo potencial la cual, si no es evitada, puede resultar en muerte o una lesión seria.



Importante

Indica una situación de riesgo que puede resultar en daño a la propiedad si no es evitado.



TIPS

Indica recomendaciones e información para un uso eficiente libre de errores.

2. SEGURIDAD



Verifique todas las partes del dispositivo para corroborar que no existen daños por transporte, si existe este daño, NO lo use. Contacte al distribuidor para que le dé instrucciones.

2.1 Limitaciones del Peso



Peligro

La capacidad de peso de los eleva sanitarios de referencia KP3-67032, KP3-67033, KP3-67034 es de 100 kg. Por favor no exceda este límite de peso.

Antes de utilizar el dispositivo, por favor, lea de manera cuidadosa las instrucciones de uso. Si tiene alguna duda, por favor contacte el servicio al cliente para que pueda ayudarle

3. REMOVIENDO/ INSTALANDO EL ELEVA SANITARIO



Para esta sección, refiérase a la figura 1, para remover el eleva sanitario, por favor realice este procedimiento en forma contraria

Referencia: KP3-67033

ELEVA SANITARIO ECONÓMICO



1. Coloque el eleva sanitario en la taza del inodoro con el segmento plano del eleva sanitario hacia la parte posterior de la taza.
2. Asiente correctamente el anillo interior del eleva sanitario dentro de la taza del inodoro
3. Verifique la estabilidad del eleva sanitario. Reajuste si es necesario.

Referencia: KP3-67032


ELEVA SANITARIO CON SEGURO



1. Con el asiento del eleva sanitario apoyado correctamente sobre el borde, enderece y centre el producto sobre la taza del inodoro todo lo que sea necesario. Gire hacia la derecha la perilla para ajustar el producto asegurándolo en el lugar. Ajuste sólo manualmente; no use herramientas y tenga cuidado de no ajustar demasiado ya que las roscas en los soportes de ajuste se podrían dañar.
2. Controle rutinariamente que el producto esté firmemente ajustado antes de usarlo. El peso del usuario deberá estar centrado sobre el asiento del inodoro; ni demasiado adelante ni demasiado hacia un lado, ya que la unidad puede inclinarse.
3. Si usted tiene un modelo de inodoro en el cual este producto no se adapta adecuadamente o no puede ser ajustado firmemente como se describe arriba, se recomienda que deje de usarlo.

Referencia: KP3-67034

ELEVA SANITARIO CON SEGURO Y BRAZOS

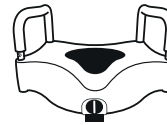

1. Para instalar los brazos, presione las clavijas de presión del brazo e introdúzcalo dentro de los tubos de montaje. Escuchará un 'clic'. Asegúrese que toda la clavija de presión salga a través de los orificios de los tubos de montaje. Hale los brazos para asegurarse de que los brazos estén bloqueados en su lugar. Para quitar los brazos, realice los mismos pasos de manera inversa.
2. Eleve el conjunto de la tapa y el asiento del inodoro y coloque los brazos posteriores del asiento del inodoro alrededor del borde del mismo (algunos inodoros pueden requerir que el conjunto del asiento sea sacado para permitir el encastre apropiado). Además, los soportes de ajuste frontal deben dejar libre el borde para que el asiento de inodoro en relieve encaje con seguridad.
3. Con el asiento de inodoro elevado apoyando apropiadamente sobre el borde, enderece y centre el producto sobre el inodoro como sea necesario. Gire la perilla de ajuste hacia la derecha para ajustar el producto firmemente en su lugar. Ajuste sólo manualmente, no use herramientas y sea cuidadoso de no apretar en exceso como ajustando una rosca.
4. Rutinariamente debe chequear que la medida es segura antes de usar el producto. El peso del usuario debe estar centralizado sobre el asiento del inodoro, no muy delante ni tampoco muy de lado ya que la unidad puede salirse de lugar.
5. Si usted tiene un estilo de inodoro en el cual este producto no puede usarse apropiadamente o si no puede asegurarse debidamente como indicamos, se le recomienda que descontinúe su uso.